



TARDIGRAD
A service no one else can deliver

Průběh testování dodanými AG testy:


1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

LEPU test:

4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
 1. Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
 2. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 1. Otevírá vyhodnocovací kartu,
 2. vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
 3. odstraňuje lepicí proužek,
 4. dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
 5. otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.




NÁVOD K POUŽITÍ

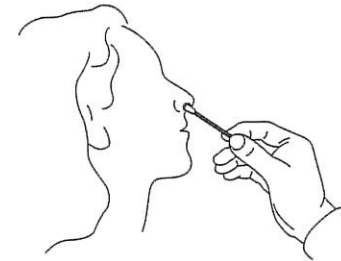


KROK 1

Odeberte vzorek pomocí výtěrové tyčinky.

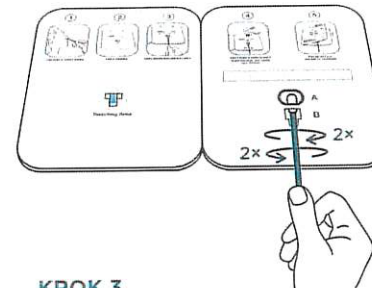


KROK 3

Tyčinkou dvakrát otočte ve směru a proti směru hodinových ručiček.

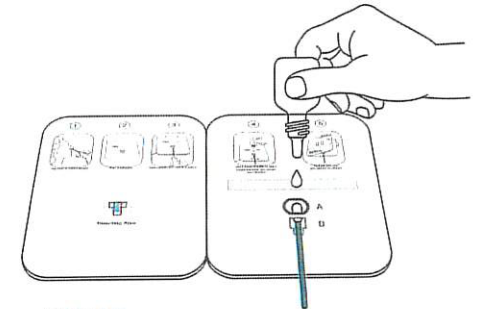

KROK 2

Prostrčte výtěrovou tyčinku se vzorkem jamkou B do jamky A a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

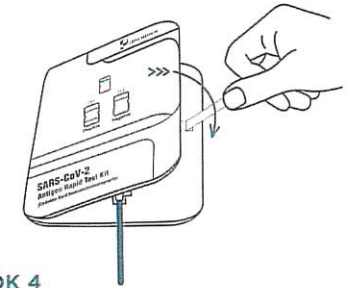


KROK 4

Odstraňte ochranný kryt fixačního lepidla. Slepťe levou a pravou stranu k sobě a vyčkejte 15 minut.




INTERPRETACE VÝSLEDKU


POZITIVNÍ
(+)

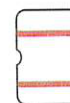

NEGATIVNÍ
(-)

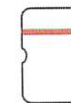

NEPLATNÝ

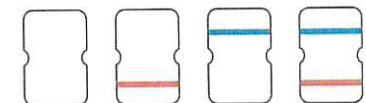

Tardigrad International Consulting, s.r.o.
Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6, Czech Republic
e-mail: prague@tardigrad.net
www.tardigrad.net



Instruktažní
video na
youtube

